



GEBRUIKSAANWIJZING

ABDUCTIEKLOS HOUDER

De zitpositie verstevigen door het plaatsen van een abductieklos

WAARVOOR DIENT HET?

Om de zitpositie te verbeteren of om de benen uit elkaar te houden tijdens de zitpositie wordt een abductieklos gebruikt. Het zitvlak wordt hiermee vergroot en de zitpositie verstevigd. Hierdoor wordt o.a. het onderuitzakken voorkomen.

HOE WERKT HET?

Plaats de vierkante plaat aan de onderzijde van de zitting door middel van 4 schroeven. Stel de vierkante pijp af en draai de sterknop strak aan. Plaats het metalen plaatje met 1 gat op de opstaande vierkante pijp van de zojuist geplaatste bevestigingsstuk. Draai de sterknop vast. Plaats nu de kussen op de plaat met 1 gat en monteer deze. De abductieklos houder wordt geleverd zonder kussen bevestigingsmaterialen.



BELANGRIJK OM TE WETEN!

Voor uw eigen veiligheid geven wij het advies de abductieklos houder door een erkende dealer te laten uitvoeren.

UITVOERINGEN;

De abductieklos houders zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van de abductieklos houder is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van dit product, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De abductieklos houder mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De abductieklos houder bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan De abductieklos houder of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;