



# **GEBRUIKSAANWIJZING**

## **ARMLEGGER VERHOOGERS**

De zitpositie verbeteren door het eenvoudig aanpassen van de armlegger hoogte van de scootmobiel of rolstoelzitting.

### WAARVOOR DIENT HET?

De armlegger verhoger is ontworpen om de zithouding te verbeteren wanneer de afstelling van de KAB-armlegger niet toereikend is. De armlegger verhogers worden altijd per set van 2 stuks geleverd voor zowel de linker- als de rechter armlegger.

### HOE WERKT HET?

De armlegger verhogers zijn alleen geschikt voor armleggers van een KAB of een zogenaamde C-zitting. De armlegger verhoger wordt tussen de zitting en de armlegger geplaatst. Draai de bouten van de armlegger los en verwijder de armlegger van de zitting. Plaats de Armlegger verhoger op de plaats van de eerder losgedraaide bouten en draai deze vast. Plaats de armlegger nu op de armlegger verhoger en draai deze vast. Voer deze handeling ook aan de andere zijde van de zitting uit, zodat de armleggers aan de linker- en rechterzijde van de zitting even hoog zijn. De bouten en moeren worden niet meegeleverd.



### BELANGRIJK OM TE WETEN!

Voor uw eigen veiligheid geven wij het advies de armlegger verhogers door een erkende dealer te laten uitvoeren.

### UITVOERINGEN;

De armlegger verhogers zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar en voor verschillende scootmobielen en rolstoelen. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is.

Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website [www.silema.nl](http://www.silema.nl)

### ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van de armlegger verhogers is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

### VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van dit product, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De armlegger verhogerset mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De armlegger verhogerset bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de armlegger verhogerset of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

### GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;