



GEBRUIKSAANWIJZING

BAGAGEMAND HOUDER

Nog geen bagagemand op de rolstoel- of scootmobiel, of is er behoefte aan extra bagage?

WAARVOOR DIEN HET?

De bagagemandhouder is ontwikkeld voor de KAB-zitting, die o.a. bevestigd is op de BEC, WINNER en TROPHY scootmobielen en is bedoeld om een extra bagagemand te plaatsen ter aanvulling van de bestaande mand (meestal aan voorzijde)

HOE WERKT HET?

De mandhouder wordt bevestigd aan de rugzijde van de KAB-Zitting. Draai de bouten los van de linker en rechter armlegger en plaats hierop de mandhouder. Draai de bouten opnieuw aan en de houder is bevestigd aan de zitting.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

De mandhouder is speciaal op maat gemaakt voor de KAB-Zitting dus deze moet automatisch passen. Indien de boutgaten niet overeenkomen met de gaten van de zitting dan heeft u niet de juiste combinatie. De mandhouder wordt geleverd zonder mand.

UITVOERINGEN;

Er zijn voor de verschillende zittingen verschillende houders. Informeer bij uw leverancier welke houder voor uw scootmobiel geschikt is. Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product heeft geen onderhoud. Reinigen van de bagagemandhouder is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van de bagagemandhouder, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De bagagemandhouder mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De bagagemandhouder bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de bagagemandhouder of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;