



GEBRUIKSAANWIJZING

BALANS GEWICHT

Vereenvoudig het pedaalgebruik van uw fiets of hometrainer met onze Balansgewichten en maar 4 schroefjes

WAARVOOR DIENT HET?

De balansgewichten houden uw trappers in evenwicht en zorgen er voor dat de trappers altijd horizontaal staan en je dus op kunt stappen en weg kunt fietsen, zonder de trappers eerst te moeten positioneren.

HOE WERKT HET?

Het gewicht van de metalen schijf is exact afgemeten zodat de trapper na montage van de metalen, horizontaal gaan en blijven staan.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

De universele balanstrappers worden geleverd zonder bouten. Dit vanwege de vele fietspedaal- uitvoeringen die er op de markt zijn en verschijnen. Zorg er voor dat de balansgewichten altijd goed vastgeschroefd worden aan de trapper. De trapper zal na montage vanzelf in de horizontale houding gaan staan. Gebruik geen andere materialen dan deze gewichten en de bevestigingsmaterialen. Dit kan de werking maar ook de veiligheid beïnvloeden.

UITVOERINGEN;

Er zijn naast deze metalen uitvoering, die voor (bijna) elk "open" pedaal geschikt is, ook balansgewichten die reeds verwerkt zijn in de pedalen. Deze pedalen worden veelal gebruikt voor in hometrainers en degelijke. Wilt u weten welke mogelijkheden er nog meer zijn, neem dan een kijkje op onze website.



Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van het balansgewicht is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van de balansgewichten, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De balansgewichten mogen alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De balansgewichten bezitten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de balansgewichten of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;