



GEBRUIKSAANWIJZING

PELOT VERSTELSYSTEMEN

WAARVOOR DIENT HET?

De Het pelot-verstelsysteem maakt het mogelijk de pelot in hoogte en breedte te verstellen. Tevens is de pelot hiermee volledig afneembaar. Het pelot -verstelsysteem wordt zowel inclusief als exclusief pelot beugels geleverd. De pelot wordt niet meegeleverd.

HOE WERKT HET?

Plaats de vierkante plaat aan de onderzijde van de zitting door middel van 4 schroeven. Stel de vierkante pijp af en draai de sterknop strak aan. Plaats het metalen plaatje met 1 gat op de opstaande vierkante pijp van de zojuist geplaatste bevestigingsstuk. Draai de sterknop vast. Plaats nu de kussen op de plaat met 1 gat en monteer deze. Het pelot-verstelsysteem wordt geleverd zonder pelot.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Wij geven het advies de keuze en de montage van het pelot-verstelsysteem door een erkend dealer te laten uitvoeren.

UITVOERINGEN;

De pelot-verstelsystemen zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product heeft geen onderhoud. Reinigen van het pelot verstelsysteem is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van dit product, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- Het pelot-verstelsysteem mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- Het pelot-verstelsysteem bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan het pelot verstelsysteem of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;