



GEBRUIKSAANWIJZING

PLATEAUVERHOGER

Plateauverhogers zijn gemaakt om de opstap- en de rijcomfort te verhogen wanneer de afstand tussen de knieën en de bodemplaat van de scooter te ver uit elkaar zitten.

WAARVOOR DIENT HET?

Plateauverhogers voor scootmobielen verbeteren de zitpositie op de scootmobiel indien de zithoogte niet toereikend is om de voeten op de bodemplaat te plaatsen. De Plateauverhoger geeft extra ondersteuning tijdens het rijden en zorgt ervoor dat uw rijcomfort drastisch verbeterd.

HOE WERKT HET?

De Plateauverhoger wordt bevestigd (dat raden wij in ieder geval aan) op de bodemplaat van de scootmobiel. De onderzijde van de Plateauverhoger is van hout gemaakt, zodat de verhoger eenvoudig te plaatsen is op de bodemplaat. De schroeven worden overigens niet meegeleverd. De Plateauverhoger kan ook los geplaatst worden uiteraard. Aan de bovenzijde van de Plateauverhoger is antislip rubber gemonteerd wat het opstappen vergemakkelijkt.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Een Plateauverhoger is niet universeel en is speciaal gemaakt voor elk type scootmobiel. Indien de Plateauverhoger niet goed past, informeer dan bij uw scootmobiel leverancier of dit inderdaad de juiste verhoger is, die bij uw scootmobiel hoort. Wij geven altijd het advies de Plateauverhoger te monteren op de bodemplaat middels schroeven. Indien de verhoger los op de bodemplaat wordt gelegd, houd u dan wel rekening met het op- en afstappen. De verhoger kan namelijk kantelen waardoor de scooter en de verhoger scheef kunnen komen te staan en de kans op vallen wordt vergroot. Bij nat weer raden wij u ook aan voorzichtig op te stappen. Ondanks de antislip kan de plateaurubber glad zijn.

UITVOERINGEN;

Voor elke type scootmobiel is een aparte Plateauverhoger verkrijgbaar. De Plateauverhogers zijn NIET onderling uitwisselbaar en zijn speciaal voor elk type scootmobiel ontwikkeld. De standaard uitvoering van de Plateauverhoger is 5 centimeter hoog maar zijn uiteraard ook in andere hoogten te bestellen, alleen is dit tegen meerprijs. Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product heeft geen onderhoud. Reinigen van het rubberen plateau is het beste met een matig vochtige doek.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van de plateauverhoger, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De plateauverhoger mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt
- De plateauverhoger is speciaal voor uw type scootmobiel ontwikkeld en gefabriceerd. Het gebruik van een onjuist model verhoogt de kans op scheef zitten met alle gevolgen van dien.
- De plateauverhoger bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de plateauverhoger of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;