



GEBRUIKSAANWIJZING

ROLLATOR HOUDER

Een rollatorhouder op uw scootmobiel maakt het mogelijk uw eigen rollator mee te nemen!

WAARVOOR DIEN HET?

Rollatorhouders zorgen voor meer mobiliteit met uw scootmobiel. De scootmobiel kan worden uitgebreid met een rollator door middel van deze houder(s).

HOE WERKT HET?

U bevestigt de rollator-montagesteun vast op de scootmobiel en monteert de rollatorhouder op de montagesteun achterop de scootmobiel. Plaatst de –soms ingeklapt- rollator in de houder en haal hem eraf als u gaat lopen.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Er bestaan vele soorten Rollators, rollatorhouders en montagesets. De juiste montagesteun en rollatorhouder verschilt dan ook per scootmobiel. Wij geven het advies de keuze van de juiste houder en de montage van de montagesteun door een erkend dealer te laten uitvoeren.

UITVOERINGEN;

Er zijn verschillende type Rollatorhouders, zowel in montage, maar ook qua gebruiksgemak zijn er meerdere mogelijkheden. Informeer bij uw leverancier welke houder voor uw rollator in combinatie met uw scootmobiel geschikt is.

Voor alle montagesteunen en houders verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van de rollatorhouder is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van de rollatorhouder, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De rollatorhouder mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De rollatorhouder bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de rollatorhouder of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;