



GEBRUIKSAANWIJZING

WANDELSTOK- EN OF KRUKHOUDER

Neem uw wandelstok overal mee naar toe op de scootmobiel.

WAARVOOR DIENT HET?

De stokhouder, eventueel in combinatie met een montagesteun, is een hulpstuk om een wandelstok of kruk mee te nemen op uw scootmobiel, rolstoel of rollator.

HOE WERKT HET?

U bevestigt de stokhouder-montagesteun vast met de meegeleverde items op de scootmobiel, rolstoel of rollator en monteert de stokhouder op deze montagesteun.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Er bestaan vele soorten scootmobielen, rolstoelen en rollators. De juiste keuze voor een montagesteun en krukhouder verschilt dan ook per type. Wij geven het advies de keuze van de juiste houder en de montage van de montagesteun door een erkend dealer te laten uitvoeren.

UITVOERINGEN;

Er zijn vele verschillende type montagesteunen en stokhouders. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle montagesteunen en houders verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product heeft geen onderhoud. Reinigen van de stokhouder is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van het de stokhouder, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De stokhouder of montagesteun mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De stokhouder bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de stokhouder of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;