



# **GEBRUIKSAANWIJZING**

## **TAXI-FIXATIE SET**

Verzeker uzelf van een veilig vervoer van A naar B in de rolstoeltaxi.

## WAARVOOR DIEN HET?

De taxi-fixatie set zorgt ervoor dat u veilig van A naar B komt met de rolstoeltaxi dankzij de bevestiging aan de rolstoel in combinatie met de taxi-bevestiging.

## HOE WERKT HET?

Zorg er voor dat zowel aan de voor- als de achterzijde van de rolstoel aansluitpunten zijn voor transport met de (taxi-)bus. Bevestig de taxifixatieset op de rolstoel via de aangegeven montagepunten op de taxifixatieset en aan de voor- en of achterzijde van de rolstoel. De chauffeur van de wagen dient er op toe te zien dat de rolstoel wordt gefixeerd aan de wagen via spanbanden en/of veiligheidsgordels.

## BELANGRIJK OM TE WETEN!

Elke rolstoel heeft zijn eigen taxifixatieset. Er bestaan vele type en merken rolstoelen. De juiste taxifixatieset verschilt dan ook per rolstoel. Wij geven het advies de keuze en de montage van de juiste set door een erkend dealer te laten uitvoeren.

## UITVOERINGEN;

De taxifixatiesets zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website [www.silema.nl](http://www.silema.nl)

## ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van de taxi-fixatie set is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van dit product, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De taxi-fixatie set mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De taxi-fixatie set bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de taxi-fixatie set of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

## GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;