



# **GEBRUIKSAANWIJZING**

## **WERKBLAD SYSTEMEN**

Werkbladen voor rolstoelen maken het mogelijk dat u voorwerpen op een vlak voor u kunt zetten en daardoor binnen reikafstand verschillende activiteiten kunt doen terwijl u in een rolstoel zit

## WAARVOOR DIENT HET?

Werkbladen voor rolstoelen zorgen ervoor dat u voorwerpen bij de hand heeft als u in een rolstoel zit. U hoeft daardoor niet te bukken of buiten de rolstoel te leunen als u bepaalde activiteiten zoals eten, schrijven of spelen, wilt doen. Werkbladen geven ook ondersteuning en voorkomen dat de armen afglijden en tussen de wielen kunnen komen. De Werkbladhouder is een hulpstuk om het werkblad te bevestigen aan de rolstoel.

## HOE WERKT HET?

De werkbladhouder bestaat meestal uit een werkbladinsteek en een galg. De werkbladinsteek wordt geplaatst onder de armlegger d.m.v. de bevestigingsogen. De montageschroeven zijn niet meegeleverd aangezien montage verschilt per armlegger/ De werkbladgalg wordt in de insteek geschoven en vastgezet met de spangreep op de werkbladinsteek. Bevestig de werkbladgalg aan het werkblad door middel van 2 gaten in het werkblad met het kunststofblok, die aan het uiteinde van de galg bevestigd zit.

## BELANGRIJK OM TE WETEN!

Er bestaan vele soorten armleggers, werkbladen en werkbladhouders. De juiste keuze verschilt dan ook per type. Wij geven het advies de juiste keuze van een werkbladsysteem door een erkend dealer te laten uitvoeren.

## UITVOERINGEN;

Er zijn vele verschillende type werkbladhouders. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is.

Voor alle montagesteunen en houders verwijzen wij u naar onze website [www.silema.nl](http://www.silema.nl)

Uw leverancier van dit product voor Nederland;