



GEBRUIKSAANWIJZING

ZITTING BEUGELS

De hoogte van de (handbewogen) rolstoelzitting eenvoudig instellen.

WAARVOOR DIEN HET?

De zitting beugels zijn ontworpen om een rolstoelzitting in hoogte af te stellen. Dit product wordt veelal gebruikt bij handbewogen rolstoelen met verschillende tijdelijke gebruikers. De zitting beugels worden altijd per set van 4 stuks geleverd en zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar.

HOE WERKT HET?

De zitting beugel bestaat uit een rond en een vlak gedeelte. Het vlakke gedeelte worden bevestigd onder de zitting en het ronde gedeelte valt over de buis van de zitting-ophanging van de rolstoel. Bepaal de juiste positie van de gaten en monteer het vlakke gedeelte van de zitting beugel aan de onderzijde van de armlegger. Doe dit voor alle vier de beugels in elke hoek van de zitting. Als de beugels gemonteerd zijn aan de zitting, hang de zitting dan over de zitting buis aan beide zijden van de rolstoel. Let op; de schroeven en of bouten en moeren worden niet meegeleverd.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Voor uw eigen veiligheid geven wij het advies de zitting beugels door een erkend dealer te laten uitvoeren.

UITVOERINGEN;

De zitting beugels zijn leverbaar in verschillende hoogten. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle type zitting beugels verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van de zitting beugels is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van de zittingbeugels, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De zitting beugels mogen alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De zitting beuges bezitten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de zitting beugels of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.
-

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;