

Installatie handleiding Omkeerschakelaar **Elite II, Plus en XS2**



Algemeen

- Om storingen te voorkomen dienen de handelingen in deze handleiding in acht te worden genomen! Lees deze handleiding dan ook eerst voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
- Deze montagehandleiding is alleen bestemd voor monteurs van rolstoeldealers en producenten binnen de revalidatiesector.

Levering omvang;

De omkeerschakeling, type **OM.52010** bevat de volgende componenten:

- Schakelaar print type KS2X
- Kabel E, JST-connector naar Minifit-connector male uitvoering
- Kabel F, JST-connector naar Minifit-connector female uitvoering
- 1 Rubber kapje voor de schakelaar
- 1 set ronde stikers
- handleiding

Veiligheid:

Koppel de accu af voordat er aan de werkzaamheden wordt begonnen. Indien het contact uit staat kunnen er namelijk nog steeds delen van de elektronica onder spanning staan.

Montage:

Kies een geschikte plaats voor de schakelaar. De plaats van de schakelaar dient altijd in overleg met de eindgebruiker te geschieden. Boor een gat van 12mm op de aangegeven positie en monteer hierin de schakelaar. Haal de connector van de potmeter los en verbind de twee connectoren met kabels E en kabel F. De JST connectoren aan de andere kant van de kabel kunnen nu op de schakelprint worden aangesloten. Het maakt niet uit op welke connector deze worden aangesloten aangezien de print symmetrisch is opgebouwd.

Testen:

Controleer of de draden nergens bekneld zitten en zet deze eventueel vast met draadboombinders, kijk tevens of de schakelaar goed vastzit. Maak altijd een proefrit en controleer de juiste werking van de schakelaar, deze kan ook tijdens het rijden omgeschakeld worden. Indien de scooter bij het omschakelen in storing slaat, wat wel eens kan gebeuren, dan dient het contact even aan/uit geschakeld te worden.

