

## Installatie handleiding Omkeerschakelaar **Fortress Calypso**



### **Algemeen**

- Om storingen te voorkomen dienen de handelingen in deze handleiding in acht te worden genomen! Lees deze handleiding dan ook eerst voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
- Deze montagehandleiding is alleen bestemd voor monteurs van rolstoeldealers en producenten binnen de revalidatiesector.

### **Levering omvang;**

De omkeerschakeling, type **OM.52011** bevat de volgende componenten:

- Schakelaar print type KS2R
- Kabel O
- Kabel C
- Kabel PWR Calypso
- 1 Rubber kapje voor de schakelaar
- 1 set ronde stickers
- handleiding

### **Veiligheid:**

Koppel de accu af voordat er aan de werkzaamheden wordt begonnen. Indien het contact uit staat kunnen er namelijk nog steeds delen van de elektronica onder spanning staan.

### **Montage:**

Kies een geschikte plaats voor de schakelaar. De plaats van de schakelaar dient altijd in overleg met de eindgebruiker te geschieden. Boor een gat van 12mm op de aangegeven positie en monteer hierin de schakelaar.

Haal de connector van de potmeter los en sluit deze via verloopkabel O aan op de schakelprint, sluit kabel C aan tussen de cockpit en de schakelprint. Tot slot moet de PWR kabel tussen de hoofdkabel en de cockpit geplaatst en de twee polige kabel daarvan op de K2R print.

### **Testen:**

Controleer of de draden nergens bekneld zitten en zet deze eventueel vast met draadboombinders, kijk tevens of de schakelaar goed vastzit. Maak altijd een proefrit en controleer de juiste werking van de schakelaar, deze kan ook tijdens het rijden omschakeld worden. Indien de scooter bij het omschakelen in storing slaat, wat wel eens kan gebeuren, dan dient het contact even aan/uit geschakeld te worden.



Rondven 40 | 6026 PX | Maarheeze | Tel. 0495 – 599 107 | [verkoop@silema.nl](mailto:verkoop@silema.nl) | [www.silema.nl](http://www.silema.nl)